

Mund-Nasen-Maske Art. 8994

Artikelbeschreibung:


- Mund-Nasen-Maske aus Baumwolle
- 2-lagig
- wiederverwendbar
- waschbar bei 95 °C
- Einheitsgröße

Materialzusammensetzung:

- **Bebänderung:** Baumwolle, nach Farben sortiert
- **Basismaterial:** Baumwolle, weiß
- **Nahtmaterial:** Baumwollgarn

Verpackungseinheit:

- Basispack: Inhalt 50 St. Mund-Nasen-Masken (gepackt in 5x10 St.)
- Karton 1: 63 x 35 x 27 cm - Inhalt 500 Stück
- Karton 2: 63 x 52 x 30 cm - Inhalt 1.000 Stück

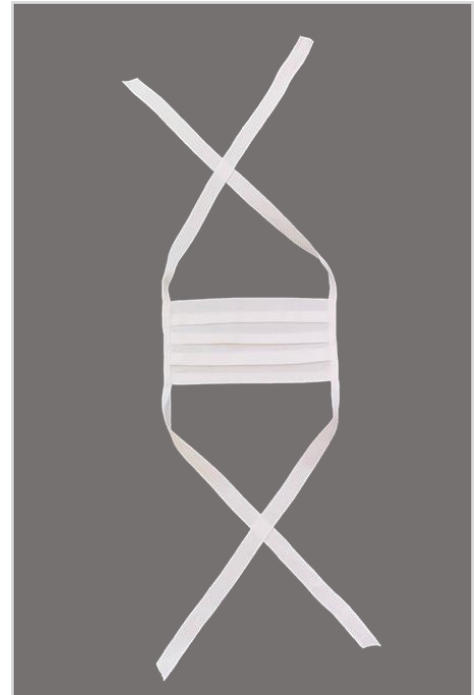



your safety comes first

Holík

Mund-Nasen-Maske Art. 8994

Anwendung:

- Wir empfehlen, die Mund-Nasen-Maske vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Bitte waschen Sie sich vor dem Anlegen der Mund-Nasen-Maske gründlich die Hände.
- Die richtig angewendete Mund-Nasen-Maske bedeckt Nase, Mund und Kinn.
- Wenn Sie die Mund-Nasen-Maske abnehmen, berühren Sie bitte nur die Befestigung.
- Waschen Sie sich danach bitte gründlich die Hände und das Gesicht.
- Wenn die Mund-Nasen-Maske nass (feucht) oder kontaminiert ist – bitte austauschen.
- Wenn Sie ganztägig eine Mund-Nasen-Maske tragen müssen, sollten Sie mehrere bei sich haben.

Wäsche / Pflege

Die Materialzusammensetzung gestattet einen Mehrfachgebrauch bei Beachtung folgender Punkte:

- Gebrauchte Mund-Nasen-Maske bei 95°C waschen und trocknen lassen.
- Bügeln mit höchster Temperatur – oder sterilisieren.
- Lagerung in trockener und dunkler Umgebung bei Raumtemperatur.

Entsorgung:

- Nach Ablauf der Lebensdauer bitte zum Abfall geben.
- Kontaminierte Mund-Nasen-Masken bitte als Sondermüll behandeln.
- Ausgesonderte Mund-Nasen-Masken bitte nach den regionalen Vorschriften entsorgen.

Hinweis: die Mund-Nasen-Maske in Form eines Tuches ist kein Atemschutz im Sinne der persönlichen Schutzausrüstung (Richtlinie 89/686/EWG).

Pflegesymbole:



Made in Czech Republic

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske schützt Ihre Umgebung!

Beachten Sie die grundlegenden Hygieneempfehlungen!

Holík GmbH
Von-der-Goltz-Str. 24 | 42329 Wuppertal
Joachim Gemmeker
e-mail: mail@holik-gmbh.de
tel.: 0202 7866278 fax.: 0202 7866279
www.holik-international.com

