



Die Rescueclean W2 Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in allen hygienisch kritischen Bereichen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind und überall, wo eine rückstandsfreie Fläche nach der Desinfektion verbleiben soll. Die Wirksamkeit gegen bakterien, Pilze und Viren ist sehr umfangreich und gem. RKI als begrenzt viruzid PLUS eingestuft.

Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit. Die Oberfläche mit dem Tuch sorgfältig wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen und die Fläche ggf. vorreinigen. Nach Tuchentnahme Verpackung wieder gut verschließen. Nur feuchte Tücher für die Desinfektion verwenden.



- | bakterizid, levurozid, tuberkulozid und mycobakterizid, inkl. MRSA,
- | wirksam gegen behüllte Viren wie z. B. HCV/HBV/HIV und Influenza
- | wirksam gegen unbehüllte Viren wie z. B. Adeno und Noro
- | bis zu 90 Tage nach Anbruch haltbar
- | begrenzt viruzid PLUS gem. RKI
- | schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung

Artikelnummern: 13935, 100 Stk. im Spendereimer
13936, 100 Stk. Refill-Beutel für Spendereimer

Inhaltsstoffe: Wirksame Bestandteile in 100g: 50g Ethanol, weitere Bestandteile:
Butanon, VE-Wasser

Gutachten/Normen: Dermatest sehr gut
Vier-Felder-Test-Gutachten

Einwirkzeiten gem. VAH und EN-Normen:

VAH	60 Sek.
Tuberkulose	60 Sek.
Adeno	60 Sek.
Vaccinia	60 Sek.
Noro	60 Sek.
MRSA	30 Sek.
Salmonellen	30 Sek.
Listerien	30 Sek.